


De Tekenkaart de Originele Safecard*

Het nieuwe en efficiënte wapen tegen
teken voor mens en dier.

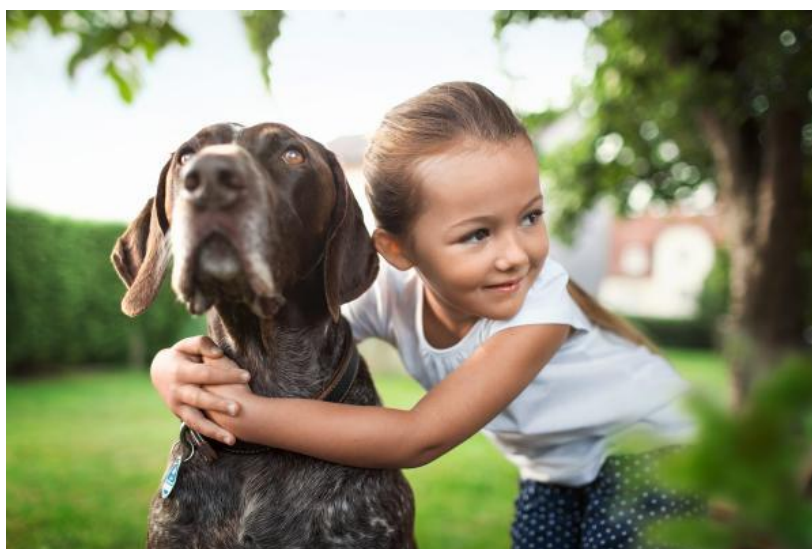

Rebstock14- D-45239 Essen (Duitsland)

Tel. 0049 15738580559mob. +31(0) 6 22 40 50 15

Mail : info@caswood.nl

www.caswood.nl – www.zeckenkarten-safecard.com

Vergeet nu de verouderde methoden!

Afgelopen met het gebruik van pincetten, tekentangen, boter of olie. Weg met het afbranden, draaien of uittrekken van de teek.

De nieuwste onderzoeksmethoden tonen namelijk aan, dat de oorspronkelijke en vroeger gebruikelijke methoden om de teek te verwijderen het risico op ernstige ziekten verhogen. Als men bij het verwijderen van de , dat de teek samendrukt, eruit draait of op een andere manier irriteert, verhoogt het risico enorm, dat de teek de gevaarlijke bacteriën in het lichaam van mens en dier injecteert, bacteriën die in het ergste geval hersenvliesontsteking (FRME) of Borreliose veroorzaken.


De nieuw tekenkaart, Safecard*, is gebaseerd op een geheel nieuw principe: teken worden zonder geweld verwijderd. Men schuift de teek eenvoudig met de speciaal voor dit doel ontwikkelde gleuf in de kaart eruit.(met een rustige glijdende beweging) Op deze manier verhindert men in de meeste gevallen de overdracht van de gevaarlijke bacteriën.

SafeCard werd in samenwerking met natuurwetenschappers, biologen en artsen speciaal tegen tekenbeten ontwikkeld. De tekenkaart is zo gevormd dat hij overal op het lichaam gebruikt kan worden. De Safecard* heeft dezelfde grootte als een pinpas of creditcard en kan in de portemonnee bij de andere creditcards opgeborgen worden.

De tekenkaart altijd bij u, altijd onder handbereik in de portemonnee, door het creditcard formaat.



De nieuwe tekenkaart maakt het mogelijk om de gevaarlijke teek te verwijderen. Eenvoudig, snel en efficiënt de teek uit de huid schuiven met de Originele Safecard tekenkaart.

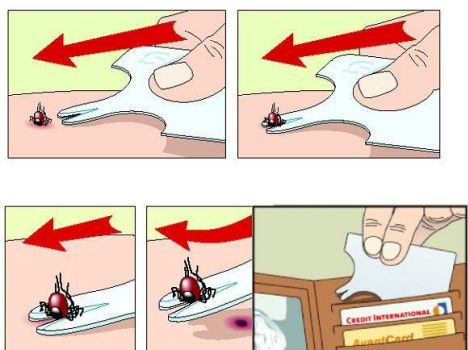

De tekenkaart Safecard* is gepatenteerd.

De tekenkaart is in samenwerking met gespecialiseerde artsen zó ontwikkeld dat de teek de minste weerstand voelt en bijna geen kans heeft om zijn gif te spuiten. De snuit van de tekenkaart is zo gevormd dat de eenvoudig eruit schuift. Gebruik uitsluitend de gepatenteerde tekenkaart Safecard*.

Waar zit de teek?

Wij zijn graag buiten, maar wij niet alleen! De teken houden zich ook graag op in het groen. Zij komen voor in de weide gebieden, in het bos in stadsparken en zelfs in uw eigen tuin. Daar zijn vele plaatsen waar de teek zich prettig voelt. Zoals struikgewas of lange grashalmen. Ook (hobby)tuinmannen, kunnen ook de teken dus oplopen. Als men een heg knipt of nieuwe planten inplant of bij het grasmaaien kan een teek zich afzetten en kan tot een tekenbeet leiden. Maar ook bij spelen op een grasveld of het lekker ontspannen in het gras liggen kunt u de teek oplopen.

.De tekenbeet kunt u niet alleen oplopen bij het wandelen of werken in de natuur, maar ook tijdens het sporten, jagen, golfen. vissen, etc.

Uw hond of kat kunnen ook door de teek gebeten worden. Controleer ook uw hond of kat 's avonds. Stel voor dat ze op bed slapen, dan bent u het volgende slachtoffer.

Vanaf 7 graden Celcius is de teek actief.



Dus altijd opletten en controleer uzelf op de teek.

Waar zit de teek bij mens en dier.

De lichaamsdelen waar de teek het meest voorkomt, zijn o.a. de borst, de buik, in de liezen, in de knieholten, in de nek. Bij kinderen zijn de teken meer op het hoofd te vinden, in tegenstelling tot bij volwassenen.

Bij de hond of kat zit de teek veelal in de liezen, bij het oor of aan de achterzijde. Dus controleer dagelijks op de teek.

Materiaal en kleuren van de Safecard.

De tekenkaart wordt geproduceerd uit ABS. Hetzelfde materiaal waaruit de Legostenen zijn gemaakt.

De standaard kleur is wit. U kunt de tekenkaart volledig in groen, blauw, rood, geel of bruin digitaal laten bedrukken.

De bedrukte Safecard is het ideale reclame middel.

Gebruik de tekenkaart als visitekaartje, Uw visitekaartje wordt nooit weggegooid. Zet de tekenkaart in als promotieartikel, marketing instrument.

Een gebruiksartikel als de tekenkaart is zeer handig en wordt altijd in de portemonnee meegenomen.

Voorbeelden:



eigen ontwerp voorzijde



achterzijde



insteek of geplakt op flyer.



transparant met loop



Transparant 1 kleur /1 zijde



All-overdruck transparant met loop

Bedrukking achterzijde, voorbeelden:



Wilt u de tekenkaart Safecard inzetten als marketing instrument?

Wij kunnen uw flyer bedrukken, vouwen, de tekenkaart insteken of plakken tegen zeer scherpe prijzen.

Uw levert het ontwerp aan en uw wensen. Het ontwerp met digitaal voorbeeld kunt u binnen enkele dagen ontvangen.

Waarschuwing: de tekenkaart is geen medicament, maar een instrument om eerste hulp te verlenen bij tekenbeten, om de teek snel en zo veilig mogelijk te verwijderen. Bij ziekteverschijnselen na de tekenbeet is zeer raadzaam op de arts te bezoeken. Voor ongepast gebruik wordt geen aansprakelijkheid genomen.

Patent kennisgeving: De tekenkaart van SafeCard* is een gepatenteerd product. De momenteel in omloop zijnde plagiaten, waarvan de vorm weinig verschilt van het Origineel, zullen gerechtelijk vervolgd worden.

Vertrouw op de kwaliteit en op de ervaring van experts en gebruik alleen de TEKENAART / SAFECARD*.

Koop geen plagiaat! U bent dan niet zeker van de kwaliteit.

Let op het merkbeeld SAFECARD* en op CE SAFECARD Aps DK8660 Skanderborg. Dit is uw garantie op kwaliteit.

Bent u geïnteresseerd in het bovenstaande?

Voor prijzen en verdere informatie mail naar info@caswood.nl

zie ook : www.caswood.nl of www.zeckenkarte-safecard.com

Tags: teken, tekenbeet, tekenkaart met reclame bedrukt, tekenverwijderen, tekengebied, borreliose, FSME, Ehrlichia, Rickettsia, tekenverspreiding, larven, nymphen, safecard, tekensoorten, lederteken, schildteken, borellien, Hyalomma-teken, teken invasie, tekenkaart marketinginstrument, tekenkaart, tekenradar, tekenpas bedrukt met logo, pinpas tekenkaart met logo